



Joystick

På joystick finns:

- En knapp med ett horn,
- En av- och påknapp,
- En display som visar, batterikapacitet, tidsangivelse, hastighet och körprofil,
- Två knappar markerade med *Mode* och *Profile*,
- En dubbelknapp som styr hastigheten.

Tryck på *Mode* för att skifta mellan framdrift och sits- och ryggjustering.

Rör styrpinnen upp eller ned för att styra tiltfunktionen.

För styrpinnen till höger eller vänster för att skifta mellan ryggvinkel (0-45°) och sitsvinkel (96-131°).

Använd tilt- och lutningsfunktionen med försiktighet, så att snabba ryck undviks.

Det finns tre körtyper: manöver, slow och fast).

Maximal hastighet är 6 km i timmen, och maximal räckvidd är nio kilometer.

Rullstolen ska laddas när batteriindikatorn når det **röda fältet**.

Ladda rullstolen till 100% varje dag, oavsett batteristatus.

Rullstolen laddas när laddaren ansluts till undersidan av joystick och till en strömkälla.

- ⚠ Rullstolen kan inte köras under laddning.
- ⚠ Om batteriet laddar ur helt, går det i skyddsläge i tre dagar och kan inte användas under denna tid.
- ⚠ Garantin täcker inte om batteriet inte laddas regelbundet, som beskrivet ovan.

Bromsar

Bromsarna är inbyggda i motorn (i hjulen). Det betyder att när man släpper joysticken, så stannar rullstolen.

Daglig rengöring av rullstolen

Rullstolens ram, sits och armstöd rengörs med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Sittdyna och kuddar kan tas av och desinficeras med etanol 70-80% eller en klorprodukt, 1000 ppm - 10 000 ppm max.

Manöverdosan kan desinficeras med samma produkter som kuddarna.



QUICK GUIDE

Kamille Power Komfortrollstol

Guide till användning av Kamille Power komfortrollstol

Från säng till rullstol aktiv användare

1. Fotstöden svängs ut mot sidan.
2. Sitthöjden anpassas efter användarens behov.
3. Användaren sätter sig i rullstolen.
4. Höftvinkeln justeras.
5. Fotstöden svängs tillbaka.

Från säng till rullstol passiv användare

1. Fotstöden svängs ut mot sidan.
2. Sittvinkeln anpassas efter användarens behov.
3. Höftvinkeln justeras via fjärrkontrollen.
4. Tilta stolen lätt bakåt.
5. Fäll upp det ena armstödet.
6. Lyft in användaren från sidan.
7. Sväng tillbaka fotstöd och armstöd.



Börja använda rullstolen

Bedöm om det finns behov av att justera fyllningen i kuddarna när användaren sitter i rullstolen.

Körbygelns vinkel justeras med tumskruvar på höger och vänster sida av körbygel. Höjden justeras med de två handtagen på baksidan.

Armstöden justeras i höjd och vinkel med hjälp av tumskruvar på sidorna.

Benstöden kan justeras i höjd och position. Benstöden har även en swing away-funktion.

Vinkeln på fotplattan och benstödet samt vinkeln på vadplattan kan justeras med verktyg.

Skanna QR-koden och hitta bruksanvisningen till Kamille Power.

(Senast uppdaterad 11-2024)

