



BRUKSANVISNING

# Bariatrisk armbågsstycka

**Stark och funktionell armbågsstycka, utvecklad till den bariatrisk användaren.**

Armbågsstyckan är anpassad till användare som väger upp till 325 kg.



# Innehållsförteckning

1. Säkerhet .....	3
2. Symbolförklaring.....	4
3. Generellt .....	5
4. Användning.....	5
5. Inställning .....	5
6. Långtidsförvaring .....	6
7. Rengöring och underhåll .....	6
8. Bortforsling .....	6
9. Garanti.....	7
10. Specifikationer .....	8
11. Beställning .....	8

# 1. Säkerhet

---



## **VARNING**

Armbågsstycket får inte användas utan en grundlig instruktion av utbildad personal eller av personer som fått en instruktion i hur armbågsstycket används. Vid felaktig användning kan användaren ta skada.

Bruksanvisningen ska läsas noggrant innan armbågsstycket tas i bruk. Var speciellt uppmärksam vid säkerhetsvägledningar markerade med

Cobi Rehab tar inget ansvar för eventuella skador på produkten eller vid personskador som förorsakats av felaktig användning av armbågsstycket.

Kontakta Cobi Rehab omgående om armbågsstycket är skadat eller har konstruktionsfel. Använd aldrig egna reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador eller för olämpliga situationer som uppstår efter reparationer som gjorts utan skriftlig tillåtelse från Cobi Rehab.



## **SÄKERHETSVÄGLEDNING**










Armbågsstycket får endast ställas in av personal eller av personer som fått en instruktion i bruket av armbågsstycket. Felaktiga inställningar kan skada användaren.


Armbågsstycket kan ta skada om den används av en användare som väger över 325 kg.

Armbågsstycket får inte användas innan knappen i snäpplåset till höjdinställningen är helt på plats. Det inre röret kan lossa om inte knappen i snäpplåset sitter korrekt. Det kan leda till att det inre röret faller in i det yttre röret.

Brist på kontroll av snäpplåset till höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel.

## 2. Symbolförklaring

Följande symboler finns i bruksanvisningen eller på produktens etikett.	
	Varning!
	Försäkran om överensstämmelse enligt direktivet om medicintekniska produkter EU 2017/745
	Cobi Rehab artikelnummer
	Serienummer
	Produktionsår
	Tillverkare
	Medicinsk utrustning klass 1
	Användarvikt
	Läs manual
CE-Etiketten är placerad på armbågskryckans rör. Exempel på etikett kan ses nedan.	

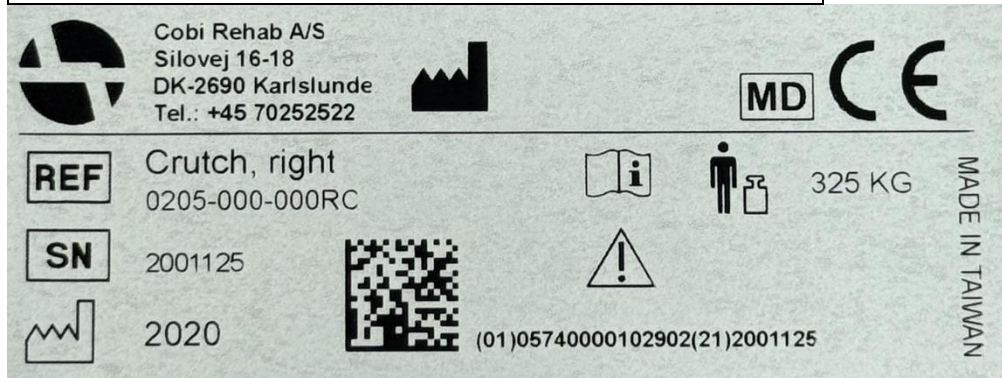

Cobi Rehab A/S  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Tel.: +45 70252522

MD CE

REF Crutch, right  
0205-000-000RC

SN 2001125

2020

325 KG

(01)05740000102902(21)2001125

MADE IN TAIWAN

## 3. Generellt

---

Denna bruksanvisning innehåller viktiga upplysningar om målgruppen för och användningen av armbågs-kryckan. Bruksanvisningen innehåller också en specifikationslista.

Den senaste versionen av bruksanvisningen finner du på vår hemsida. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen.

Har du behov av en bruksanvisning med större text, finns bruksanvisningen i PDF-format på [www.cobirehab.se](http://www.cobirehab.se). Där kan du förstora upp bruksanvisningen i textstorlek.

Kontakta Cobi Rehab på telefon 08-702 97 74 om du önskar mera upplysningar om armbågs-kryckan.


Cobi Rehab förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan föregående varsel.

Produktsäkerhetsmeddelanden och tillbakakallelse av produkter kan ses på vår hemsida under <https://www.cobirehab.com/kunde-hos-cobi/viktig-produktinformation/>

## 4. Användning

---

Armbågs-kryckan är en extra förstärkt krycka som är speciellt utvecklad till att ge stöd och säkerhet under gång till användare som väger upp till 325 kg.

 Armbågs-kryckan kan ta skada om den används av personer som väger över 325 kg.

Armbågs-kryckan används på sjukhus, omsorgsboenden och i privata hem.

Armbågs-kryckan kan användas både inomhus och utomhus.

Rådfråga alltid en förskrivare innan armbågs-kryckan rekommenderas till en användare.

### Kontraindikationer

Det finns inga kontraindikationer förknippade med bruket av armbågs-kryckan.

## 5. Inställning

---

Armbågs-kryckan ställs in i höjd genom att knappen i snäpplåset tas ur och det inre röret sätts i önskad längd. Tryck in knappen i hålet och tryck den sedan på plats.

Armbågs-kryckan får inte användas om knappen i snäpplåset inte är helt på plats.

Det inre röret kan lossna om inte knappen i snäpplåset sitter korrekt. Det kan få till följd att det inre röret glider in i det yttre röret.

## 6. Långtidsförvaring

---

Armbågs-kryckan bör förvaras mörkt och i en temperatur mellan -10° - 50° C.

## 7. Rengöring och underhåll

---

Armbågs-kryckan kan rengöras med vatten och vanligt rengöringsmedel.

Snäpplåset till höjdinställningen ska regelbundet kontrolleras och bytas ut om det är nödvändigt.

⚠ Brist av kontroll av låsknappen till höjdinställningen kan förorsaka funktionsfel.

### Desinficering

Armbågs-kryckan kan desinficeras med ytdesinfektion eller med en klorprodukt 1000-1200 ppm.

⚠ Desinficera alltid armbågs-kryckan innan den ska användas av en ny person för att undvika kors-kontaminering.

Eventuella lokala rutiner kring rengöring och underhåll ska alltid följas.

## 8. Bortforsling

---

När armbågs-kryckan inte längre används ska den bortforslas på ett miljövänligt sätt.

Kontakta Cobi Rehab eller kommunen för ytterligare information om bortforsling.

## 9. Garanti

---

Cobi Rehab garanterar att armbågsstycket är felfri när den levereras. Skulle den mot förmodan vara felaktig eller skadad vid leverans, kontakta Cobi Rehab omgående.

Garantiperioden för armbågsstycket är ett år från dagen för köpet och täcker produktionsfel eller defekter vid leverans. Fakturan gäller som garantibevis.

Garantin gäller ej:

- produkter där serienummer, batchnummer eller liknande har försvunnit eller är väsentligt skadat.
- produkter som har reparerats av ej auktoriserad personal.

Garantin omfattar ej:

- slitagedelar

### 9.1 Oförutsedda händelser

Varje oförutsedd händelse som inträffar vid bruk av armbågsstycket ska rapporteras till Cobi Rehab.

### 9.2 Efter förväntad livslängd

Efter den förväntade livslängden är det viktigt att det görs en bedömning av produkten innan fortsatt bruk.

Efter den förväntade livslängden kan Cobi Rehab inte garantera lämplighet och säkerhet av produkten, då Cobi Rehab inte har någon kontroll över hur produkten är använd och hur sliten den är.

Garantin gäller ej i de fall Cobi Rehab bedömer att armbågsstycket blivit felaktigt hanterad eller på olämpligt sätt.

Vid skada på grund av felaktig användning faktureras både service och reservdelar.

Cobi Rehab kan inte hållas ansvarig för skador av någon art.

⚠ Brist på underhåll kan skada armbågsstycket, förkorta livslängden eller påverka styckets prestanda.

## 10. Specifikationer

---

Max användarvikt	325 kg
Höjjusterbar	68-110 cm
Vikt	1,5 kg
Reflex	Ja
Underarmsstöd	15 cm
Handtag	14 cm
Anatomiskt handtag	Ja
Material	Krom Molybdenstål
Grepp	Nylon
ISO - klassifikation	ISO 12 03 06 - 04
Produktens förväntade livslängd	7 år
Riskklass	I
UDI-DI	5740000102889/5740000102896/5740000102902
Grundläggande UDI	5740000100010MV
Yttemperaturen på armbågsstycket kan stiga eller sjunka om den utsätts för yttre kyla och värme.	

## 11. Beställning

---

Modell	Artikelnummer
Bariatrisk armbågsstycke med standard handtag	0205-000-000C
Bariatrisk armbågsstycke med anatomiskt handtag höger	0205-000-000RC
Bariatrisk armbågsstycke med anatomiskt handtag vänster	0205-000-000LC





# COBI REHAB

---



## TILLVERKARE

**Cobi Rehab**  
Silovej 16-18  
DK-2690 Karlslunde  
Danmark  
+45 7025 2522

[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

## LEVERANTÖR

**Cobi Rehab**  
c/o Helio  
Hornsbruksgatan 23 B  
117 34 Stockholm  
Tel 08-702 97 74

[cobirehab.se](http://cobirehab.se)